

[illegible]

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab			Ujian			Klinik		
		Tgl.			Tgl.			Tgl.		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
	5. Simpan alat yang telah di steril dan pindahkan menggunakan korentang ke dalam bak instrument steril. 6. Catat pd buku catatan H. STERILISASI DENGAN BAHAN KIMIA LANGKAH KERJA: 1. Membersihkan alat ² dari kotoran 2. Merendam alat-alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit 3. Membersihkan alat-alat dan mencuci (memakai sarung tangan dan pelindung lain) 4. Memasukkan alat-alat yang akan disterilkan ke dalam wadah yang diberi gluteraldehid 2-4%/ cydex dan direndam sekurang-kurangnya 10 jam/ menggunakan formaldehid 8% dan direndam selama 24 jam. 5. Simpan alat yang telah di steril dan pindahkan menggunakan korentang ke dalam bak instrument steril. 6. Catat pd buku catatan									
III	SIKAP: 1. Cermat/ teliti 2. Hati-hati									
IV	PENYELESAIAN: 1. Merapikan alat									
PEMBIMBING LABORATORIUM										
NILAI										
PENGUJI										
NILAI										
PRESEPTOR										
NILAI										

$$\text{Nilai} : \frac{\sum \text{Skor}}{\sum \text{Poin} \times 2} \times 100 =$$