

JENIS KETERAMPILAN : MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG LABBORATORIUM SEDERHANA HB

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl.			Ujian Tgl.			Klinik Tgl.		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	<p>PERSIAPAN ALAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 haemometer + pipet hemoglobin dengan pipa kecil 1 alat pengaduk Beberapa vaccinosyle / lancet Beberapa kapas alcohol Larutan HCl 01 N Aquades secukupnya Mengisi tabung pengencer dalam larutan HCl sampai skala 2 <p>PERSIAPAN PASIEN DAN LINGKUNGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tujuan tindakan kepada pasien Pasien duduk dan berbaring Lingkungan : ruang khusus tertutup Atur pencahayaan secukupnya 									
II	<p>LANGKAH KERJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencuci tangan Petugas duduk / berdiri disebelah kanan / depan pasien Menghapushamakan jari pasien Menusuk ujung jari dengan vaccinosyle Menghisap darah dengan pipet sampai garis 20 mm^3 Membersihkan bagian luar dari pipet yang terkena darah dengan kapas Memasukkan pipet yang bersih darah ke dasar pengencer berisi larutan HCl 0.1 N dan meniupnya jika perlu Membiarakan terlebih dahulu sampai terbentuk asam hematin, sementara membilas pipet dengan HCl yang jernih dari tabung Mencampurkan dengan alat pengaduk sehingga darah dan HCl bersenyawa Meneteskan aquades samapi terjadi persamaan warna dengan standart Membaca hasil dalam waktu 5 menit setelah darah dan HCl bercampur 									
III	SIKAP									
	<ol style="list-style-type: none"> Teliti Sabar Sopan 									
IV	<p>PENYELESAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Merapikan pasien Membereskan alat-alat Mencatat hasil pemeriksaan ke dalam status Membuat kesimpulan Memberikan nasehat jika ada kelainan 									
PEMBIMBING LABORATORIUM										

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl.			Ujian Tgl.			Klinik Tgl.		
NILAI	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
PENGUJI										
PRESEPTOR										
NILAI										

Nilai : $\frac{\sum \text{Skor}}{\sum \text{Poin} \times 2} \times 100 =$